



SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE®

Osiągnięcie precyzyjnej estetyki i zwiększenie wydajności przy wykorzystaniu systemu pobierania wycisku BellaTek™ Encode®



- Proste rozwiązanie, brak konieczności stosowania transferów wyciskowych, ani żadnych innych komponentów.
- Jedyne rozwiązanie CAD/CAM niwelujące urazowość tkanek miękkich.
- Precyzyjne, indywidualne łączniki z tytanu i cyrkonu, dostępne na platformy protetyczne od 3,4 mm do 5,0 mm.
- Kompatybilne ze skanerem wewnątrzustnym Lava™ C.O.S. i Cerec Omnicam. Od cyfrowego wycisku po indywidualne rozwiązanie protetyczne.

BIOMET 3i™
PROVIDING SOLUTIONS - ONE PATIENT AT A TIME™

Prezentujemy *BellaTek*™

System Pobierania Wycisku Encode®

BIOMET *3i* może zaoferować specjalistom stomatologicznym, laboratoriom i co najważniejsze ich pacjentom, szeroką linię rozwiązań cyfrowej stomatologii zapewniających estetykę i precyzję – *BellaTek*™.

Nie ma potrzeby stosowania transferów wyciskowych, ani żadnych innych komponentów. Lekarz pobiera jeden wycisk śruby gojącej *BellaTek*™ Encode - (wcześniej znanej jako śruba gojąca Encode) wykorzystując skaner wewnętrzny lub tradycyjną technikę pobierania wycisku. Na tej podstawie otrzyma on indywidualną nadbudowę CAD/CAM *BellaTek*™ wraz z koroną gotową do zacementowania.



Śruba gojąca
BellaTek™ Encode


Wybierz rodzaj wycisku (cyfrowy lub tradycyjny)

1. Pobierz wycisk.

2. Otrzymasz nadbudowę *BellaTek*™.


Specjalne kody umieszczone na okluzyjnej stronie śruby gojącej *BellaTek*™ Encode zostają odzwierciedlone w masie wyciskowej lub zapisane przez skaner wewnętrzny, a następnie przekazane do BIOMET *3i*. Kod ten zawiera kluczowe informacje (głębokość osadzenia implantu, orientację heksu, średnicę platformy protezycznej, rodzaj łączenia) potrzebne do zaprojektowania i wycięcia ostatecznej nadbudowy.

Wycisk cyfrowy

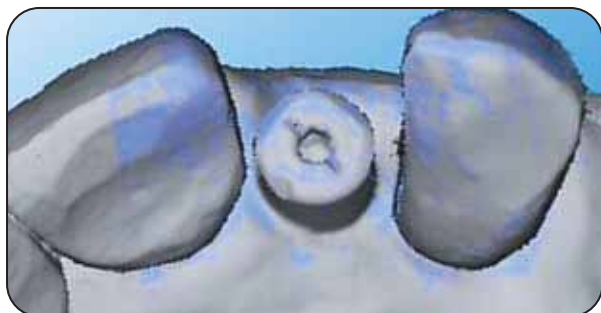

Skan wewnętrzny śruby gojącej
BellaTek™ Encode


Wycisk tradycyjny

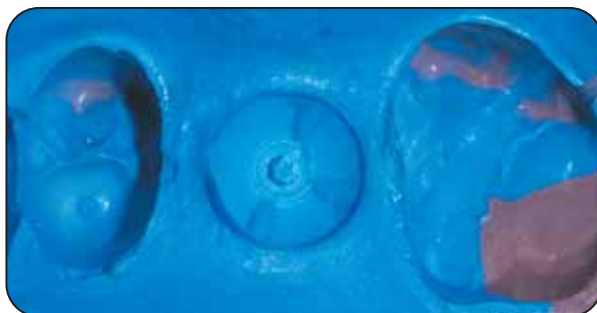

Odzwierciedlenie w masie śruby gojącej
BellaTek™ Encode



Model stworzony na podstawie skanu
wewnętrznego śruby gojącej *BellaTek*™ Encode

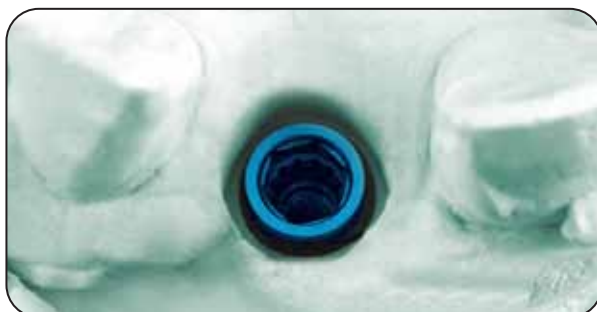

Model odlany na podstawie tradycyjnego wycisku
śruby gojącej *BellaTek*™ Encode

Korzyści *BellaTek™*

Wyjątkowe wyniki kliniczne

Technik dentystyczny projektuje indywidualną nadbudowę z właściwą wysokością kołnierza, naturalnym profilem wyłaniania z uwzględnieniem okalających tkanek miękkich i zębów. Nadbudowy dostępne są w cyrkonie i tytanie.

Wycisk cyfrowy:



BIOMET *3i* opatentował system pobierania wycisku *BellaTek™ Encode* umożliwiający skan wewnątrzustny śrub gojących *BellaTek™ Encode*, dzięki czemu możemy ochronić tkanki miękkie i osiągnąć optymalnie precyzyjny i estetyczny rezultat.

Specjalne kody na śrubie gojącej *BellaTek™ Encode* dostarczają kluczowych informacji potrzebnych do zaprojektowania i wycięcia nadbudowy, prowadząc do bardziej przewidywalnych rezultatów klinicznych.

Przewidywalność



Jeden wycisk – brak konieczności korzystania z transferów wyciskowych przekłada się na oszczędność czasu.

Efektywność



*Osiągnięcie precyzyjnej estetyki i zwiększenie wydajności nigdy nie było prostsze niż przy wykorzystaniu systemu pobierania wycisku *BellaTek™ Encode*.*

Brak konieczności wymiany śrub gojących oznacza lepszą i zdrowszą tkankę miękką.

Precyzyjna Estetyka



Opatentowany system pobierania wycisku *BellaTek™ Encode* wraz ze skanerem wewnątrzustnym i technologią Robocast.

Technologia



System pobierania wycisku *BellaTek™ Encode* jest również dostępny ze standardowymi nadbudowami BIOMET *3i*.

Prezentujemy *BellaTek*™

System pobierania wycisku *BellaTek*™ Encode – tradycyjna metoda pobierania wycisku

Przypadek zaprezentowany przez:
Roberta G. Rittera, DMD, Jupiter, FL, USA

**Przypadek kliniczny leczenia nierokującego
siekacza szczęki (12) u 58-letniej pacjentki.**



Rys.1

*Widok śruby gojącej
BellaTek™ Encode.*



Rys.2

*Model wykonany z twardego
gipsu o niskiej ekspansji
na podstawie wycisku
poliwinylosiloksanowego
z poziomu śruby gojącej
BellaTek™ Encode.*



Rys.3

*Po zeskanowaniu modelu,
wirtualnie zaprojektowano
nadbudowę cyrkonową BellaTek™.*



Rys.4

*Na modelu wprowadzono analog
wykorzystując technologię
Robocast. Nadbudowę
cyrkonową BellaTek™
umieszczono na modelu celem
przygotowania ostatecznej
korony pełnoceramicznej.*



Rys.5

*Na implancie osadzono
cyrkonową nadbudowę BellaTek™
i dokręcono ją specjalną złotą
śrubą przeznaczoną do
łączyników cyrkonowych
BellaTek™.*



Rys.6

*Ostateczne osadzenie korony
pełnoceramicznej.*

Prezentujemy *BellaTek*™

Cyfrowe pobranie wycisku

Przypadek zaprezentowany przez:
Paulino Castellon, DDS, Dallas, TX, USA

**Przypadek kliniczny odbudowy protetycznej
na 3 implantach w szczęce u 54-letniej pacjentki.**




Rys.1

**Śruby gojące *BellaTek*™ Encode
osadzone na implantach
w miejscu zębów 14, 22 i 25.**



Rys.2

**Widok od strony okluzyjnej po
zeskanowaniu śrub gojących
BellaTek™ Encode.**

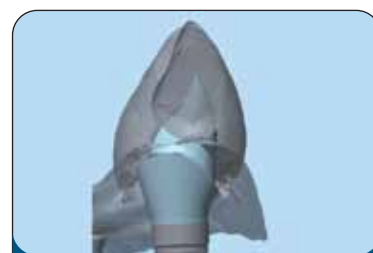


Rys.3

**Cyfrowy obraz nadbudowy
BellaTek™ na implancie w miejscu
zęba 22 przed jej
wyfrezowaniem.**



Rys.4

**Roboczy model szczęki
wykonany z trwałego
poliuretanu, posegmentowany.
Dodatkowo roboczy model
żuchwy.**

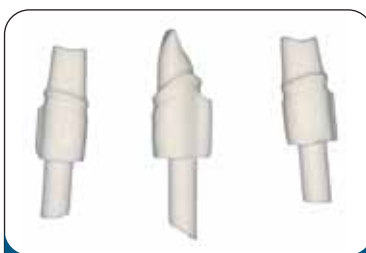

Rys.5

**Ruchome elementy
odpowiadające każdej
z tytanowych nadbudów
BellaTek™.**



Rys.6

**Ostateczne tytanowe
nadbudowy *BellaTek*™.**



Rys.7

**Ostateczna korona na modelu
i na ostatecznej tytanowej
nadbudowie *BellaTek*™.
Weryfikacja precyzji
dopasowania.**



Rys.8

**Widok koron od strony
okluzyjnej po ich ostatecznym
zacementowaniu.**



Rys.9

**Zacementowane
ostatecznie korony.**

Szukasz estetycznych rozwiązań dla Twoich pacjentów?

BellaTek™ jest do Twojej dyspozycji!

***Więcej informacji uzyskasz
u swojego opiekuna BIOMET 3i
lub na stronie***

www.dental-depot.com



ART1059PL

REV F 05/13



Facebook
Dental Depot Wasio

Wyłączny przedstawiciel BIOMET3i w Europie Środkowej:

Dental Depot Wasio

Siedziba Główna

al. Lipowa 32, 53-124 Wrocław

tel.: +48 71 335 70 71, fax: +48 71 335 70 90

email: biura@dental-depot.com

Oddział Warszawa

ul. Konstancińska 2/78

02-942 Warszawa

tel.: +48 22 646 24 73, fax: +48 22 646 30 13

email: biurowarszawa@dental-depot.com

www.dental-depot.com

BIOMET 3i™
PROVIDING SOLUTIONS - ONE PATIENT AT A TIME™