

*BellaTek*TM ENCODE[®] - WARTO PAMIĘTAĆ

*BellaTek*TM Encode Complete[®] - Chirurg

- Używaj **wysokich** śrub gojących *BellaTek*TM Encode. Śruba gojąca *BellaTek*TM Encode, nie licząc kopuły śruby, powinna wystawać co najmniej 1 mm powyżej dziąsła na pełnym swoim obwodzie. Ma to istotne znaczenie podczas pobierania wycisku oraz podczas procesu skanowania.
- Użycie śruby gojącej z **szerszym profilem EP** zapewni łatwiejsze osadzanie końcowej nadbudowy, bez ryzyka zbyt silnej kompresji tkanek miękkich. W przypadku zastosowania *BellaTek*TM Encode Complete upewnij się, że model nie jest podzielony oraz nie zawiera pinów.
- Upewnij się, czy śruba gojąca *BellaTek*TM Encode jest **prawidłowo osadzona** na implancie. Śruba gojąca *BellaTek*TM Encode składa się z dwóch części. Większa część posiada łączenie z heksem, które odwzorowuje położenie implantu.
 - W celu prawidłowego osadzenia śruby gojącej może być konieczne zastosowanie **Bone Profilera**.
 - Właściwe osadzenie śruby gojącej na implancie może być weryfikowane za pomocą **zdjęcia radiologicznego**.
- Śruba gojąca Encode powinna być przykręcona z **siłą 20 Ncm** przy użyciu śrubokrętu z dużym hensem.

*BellaTek*TM Encode Complete - Lekarz Protetyk

- **Radiologicznie** zweryfikuj **właściwe osadzenie** śruby gojącej *BellaTek*TM Encode na implancie.
- Sprawdź, czy śruba gojąca *BellaTek*TM Encode wystaje **1mm powyżej** tkanek miękkich na całym obwodzie.
- Przed pobraniem wycisku **ręcznie przykręć** śrubę gojącą *BellaTek*TM Encode.
- Użyj materiału wyciskowego o średniej sprężystości (polieter lub poliwinyl).
 - Lepsze wyniki można osiągnąć poprzez zastosowanie materiału wyciskowego o **małym stopniu twardości** wokół śruby gojącej i materiału o **średnim stopniu twardości** do wypełnienia łyżki wyciskowej.
- Sprawdź czy wszystkie oznaczenia śruby gojącej *BellaTek*TM Encode zostały wyraźnie odwzorowane w wycisku (brak pęknięć, zarysowań, pęcherzy i zanieczyszczeń) oraz czy widoczny jest kontur tkanek miękkich wokół pełnego obwodu śruby gojącej.
- W przypadku mostu powyżej trzech punktów należy przygotować **gipsowy model diagnostyczny**.
- W sytuacji odbudowy na wielu implantach, zalecane jest przygotowanie **weryfikującej struktury metalowej**.

Dodatkowe informacje o *BellaTek*TM Encode:

- Maksymalna korekcja kąta w przypadku nadbudów tytanowych to 30°.
Nadbudowa cyrkonowa dostępna dla łączenia wewnętrznego Certain:
- zęby przednie, platforma 3,4 mm, 4,1 mm, 5,0 mm, korekcja kąta do 30°,
 - zęby przedtrzonowe, platforma 4,1 mm, korekcja kąta do 20°, platforma 5,0 mm, korekcja kąta do 30°,
 - zęby trzonowe, platforma 5,0mm korekcja kąta 20°

*BellaTek*TM

ENCODE[®] IMPRESSION SYSTEM



BellaTek™ ENCODE® - WARTO PAMIĘTAĆ

BellaTek™ Encode Complete® - Laboratorium

- Skontroluj **dokładność odwzorowania** śruby gojącej *BellaTek™* Encode w wycisku. Wycisk śruby gojącej musi być czytelnie widoczny. Śruba gojąca powinna wystawać 1mm powyżej dziąsła na całym obwodzie. Kody na śrubie powinny być czytelne, bez żadnych pęknięć, zarysowań, pęcherzy czy zniekształceń.
- Używaj **gipsu o niskiej ekspansji**. Prawidłowe zeskanowanie modelu zapewni:
 - Czytelne odwzorowanie śruby gojącej, posiadającej kołnierz wystający co najmniej 1mm powyżej linii dziąsła.
 - Powierzchnia okluzyjna pozbawiona wszelkich defektów.
 - Czytelne odwzorowanie otaczających tkanek.
 - Model nie zawierający żadnych ubytków ani pęcherzy.
- W procesie przygotowania masy gipsowej proporcje suchego gipsu do wody powinny być zachowane zgodnie z zaleceniami producenta. **Odważ oraz zmierz** gips i wodę.
- Pozostaw odlew do **całkowitego zastygnięcia**.
- Model powinien być wystarczająco szeroki, aby umożliwić łatwe wprowadzenie analogu i profilu EP nadbudowy.
- Celem zapewnienia miejsca na wprowadzenie analogu przygotuj model na co najmniej **dwucentymetrowej** platformie.
- Model musi być **jednolity, bez pinów**. Nie dziel modelu i nie używaj metalowych bądź plastikowych pinów ani płytek. Piny bądź płytki (zarówno metalowe, jak i plastikowe) są niedopuszczalne w modelu gipsowym. Mogą one spowodować zniszczenia bądź uszkodzenia wiertel podczas procesu wprowadzania analogu przez robota.
- Wykorzystując indeks zgryzu umieść modele w artykulatorze kompatybilnym z **plytkami Adesso**. **Używać jedynie oryginalnych, nieuszkodzonych płytek Adesso**.
 - Użycie artykulatora kompatybilnego z płytkami Adesso gwarantuje powtarzalność artykulacji.
 - Seria artykulatorów Stratos firmy Ivoclar oraz artykulatory firmy Baumann, Amann, Girmach, Artex®, KaVo®, SAM®, Dentatus® są w pełni kompatybilne z płytkami Adesso. W celu uzyskania informacji o możliwości zakupu artykulatora, prosimy o kontakt z opiekunem klienta BIOMET 3i.
 - Używaj właściwie skalibrowanego artykulatora. W celu nabycia klucza do kalibracji należy skontaktować się z producentem.
- Umieść model na płytkach mocujących.
 - Model musi być umieszczony **centralnie** na płytkach mocujących, ponieważ skaner czytuje dane lokalizacyjne z płytek. Jeżeli model został w niewłaściwy sposób umieszczony na płytkach mocujących, nastąpi błędne zeskanowanie modelu.
 - Krawędź sieczna zębów centralnych szczęki musi być dostosowana do pionowego pinu, na pinie centralnym artykulatora. Pin centralny należy ustawić w położeniu zerowym i osadzić na stoliku siecznym.
- Formularz zamówieniowy musi być w całości czytelnie wypełniony, zawierać nazwę klienta, inicjały pacjenta, podpis, rodzaj preparacji, pozycję implantu, umieszczenie analogu (tak lub nie) oraz wszelkie inne niezbędne informacje. Jednym z najczęstszych powodów, dla których następuje opóźnienie w realizacji zlecenia jest niekompletny bądź nieczytelnie wypełniony formularz zamówieniowy.
- Wyślij zestaw składający się jedynie z głównego modelu, modelu łuku przeciwległego oraz z formularza zamówieniowego. Indeks zgryzu jest potrzebny w przypadku bezzębna. **Nie należy wysyłać dodatkowych rzeczy**, takich jak: wycisk, artykulator, itp., gdyż może to spowodować opóźnienia w realizacji zlecenia.
- W przypadku odbudowy na wielu implantach zalecane jest przygotowanie metalowej lub akrylowej struktury weryfikującej.

Dodatkowe informacje o *BellaTek™* Encode:

Maksymalna korekcja kąta w przypadku nadbudów tytanowych to 30°.

Nadbudowa cyrkonowa dostępna dla łączenia wewnętrznego Certain:

- zęby przednie, platforma 3,4 mm, 4,1 mm, 5,0 mm, korekcja kąta do 30°,
- zęby przedtrzonowe, platforma 4,1 mm, korekcja kąta do 20°, platforma 5,0 mm, korekcja kąta do 30°,
- zęby trzonowe, platforma 5,0mm korekcja kąta 20°

Siedziba główna:

al. Lipowa 32, 53-124 Wrocław

tel.: +48 71 335 70 71, fax: +48 71 335 70 90

www.dental-depot.com, biura@dental-depot.com

Oddział Warszawa:

ul. Wybieg 19 (wejście od ul. Słonecznej 27), 00-788 Warszawa

tel.: +48 22 646 24 73, fax: +48 22 646 30 13

www.dental-depot.com, biurowarszawa@dental-depot.com